




- A** Entfernen Sie mit Hilfe einer Nadel oder eines ähnlichen Gegenstandes so viel als möglich vom alten, losen Zement aus dem Innern der Brücke oder der Krone. Arbeiten Sie vorsichtig und versuchen Sie, die Krone nicht zu beschädigen.

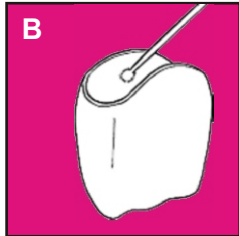


- B** Reinigen Sie das Innere der Krone mit Hilfe der mitgelieferten Mikrobürste mit warmem Wasser und Seife und spülen Sie das Ganze unter laufendem Wasser aus. Die Krone sollte dabei vorzugsweise feucht bleiben, allerdings nicht tropfnass.

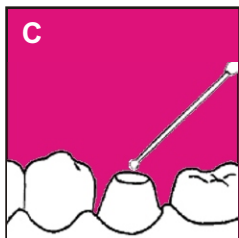

- C** Mit der Mikrobürste reinigen Sie nun die Stelle im Mund, wo die Brücke oder Krone wieder eingesetzt werden soll. Bevor Sie die Brücke oder Krone wieder einsetzen, den Mund mit Wasser ausspülen (trocknen Sie dabei den Zahnstumpf nicht ab).

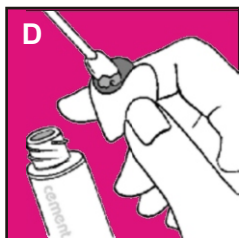

- D** Sie dann mit dem mitgelieferten Spatel eine kleine Menge von Fixobridge™ -3cement auf den inneren Rand der Krone auf. Achten Sie darauf, dass Sie die Innenhöhle der Krone dabei nicht auffüllen. Bei einer **Brücke** bringen Sie unter Zuhilfenahme des mitgelieferten Spatels eine kleine Menge von Fixobridge™ -3cement auf den inneren Rand jeder Krone auf.

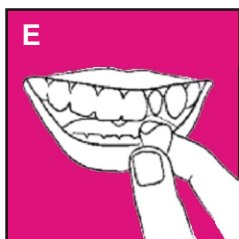

- E** Drücken Sie dann die Krone ungefähr 3 Minuten fest an den Zahnstumpf. Im Falle einer Brücke setzen Sie diese auf die entsprechenden Zahnstümpfe und drücken sie mit Daumen und Fingern nieder. Beißen Sie danach leicht zu, um die Brücke zu befestigen. Sobald Sie Ihre Zähne problemlos aufeinander pressen können, ist die Brücke wieder in der ursprünglichen Position. **(Sollte die Brücke oder Krone nicht richtig sitzen, bleiben Ihnen fünf Minuten, um den gesamten Vorgang zu wiederholen.)**



- F** Entfernen Sie den eventuell überschüssigen Fixobridge™ -3cement mit der Mikrobürste. **Der Zement bindet ca. 15-20 Minuten nach Kontakt mit dem Speichel. Vermeiden Sie während der nächsten 3 Stunden jegliches Kauen.**

Wichtig:

- Vergessen Sie bitte nicht, dass Fixobridge™ -3cement ungefähr 15-20 Minuten braucht, bis es in Verbindung mit dem Speichel bindet. Fixobridge™ -3cement ist kein Klebstoff.
- Verwenden Sie immer nur kleine Mengen und bringen Sie diese ausschließlich an der Innenseite der Krone auf.

Achtung:

- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Bewahren Sie Fixobridge™ -3cement an einem kühlen, trockenen Ort auf (5-25°C / 41-77°F).
- Schrauben Sie die Verschlusskappe nach jeder Anwendung unbedingt wieder fest zu.

Packungsinhalt: 1 Tube Fixobridge™ -3cement, 1 Spatel, 1 Plastik-Einlage, 3 Mikrobürsten, Gebrauchsanweisung.

Inhaltsstoffe: Kalziumsulfat, Bariumsulfat, Glykolether, Zinkoxid, Acrylpolymer, Triacetin.