


Lesen Sie vor der Anwendung die Warnhinweise.

1. Reinigen Sie vor Auftragen der Creme Ihre Prothese wie gewohnt.
2. Entfernen Sie das Anti-Feuchtigkeits- & Hygienemetallsiegel von der Tube.
3. Feuchten Sie Ihre Prothese an und tragen Sie die Creme wie auf dem Bild gezeigt auf.

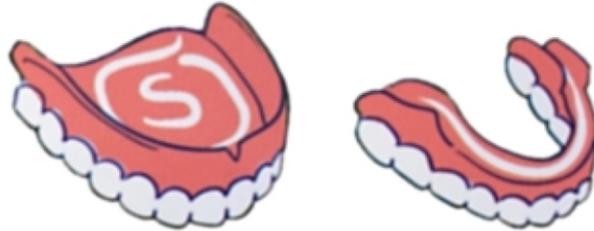

4. Bevor Sie Ihre Prothese einsetzen, trinken Sie einen Schluck Wasser, um das Zahnfleisch zu befeuchten. Dies wird insbesondere bei Patienten empfohlen, die unter Mundtrockenheit leiden, da sich die Creme mit Feuchtigkeit oder Speichel aktiviert.
5. Setzen Sie Ihre Prothese ein und fixieren Sie sie, indem Sie einige Sekunden lang Druck darauf ausüben.
6. Warten Sie 5 Minuten, bevor Sie etwas essen oder trinken.

Hinweis: Wenn Sie Schwierigkeiten haben, die Creme aus der Tube zu drücken, legen Sie sie kurz in ein Glas mit warmem Wasser (bis zu 50°C). Achten Sie darauf, dass die Kappe nicht ins Wasser eintaucht. Wenn die Öffnung der Tube verstopft, verwenden Sie eine saubere Nadel, um sie wieder frei zu machen. Halten Sie das Düsenröhrchen trocken und frei von überschüssiger Creme, um ein Verstopfen zu verhindern.

Warnhinweise: Das Produkt nicht verwenden, wenn das Düsenröhrchen nicht versiegelt ist. Das Produkt gemäß der Gebrauchsanweisung anwenden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht anwenden, wenn eine bekannte Überempfindlichkeit oder Allergie gegenüber einem der Bestandteile vorliegt. Wenn Sie Arzneimittel einnehmen, die Ihr Zahnfleisch oder Ihre Mundhöhle beeinträchtigen, konsultieren Sie vor der Anwendung des Produkts einen Zahnarzt. Im Falle von Zahnfleischirritationen oder schmerzen die Anwendung abbrechen und einen Zahnarzt konsultieren, falls erforderlich. Schmerzen und Beschwerden können auch von schlecht sitzenden oder beschädigten Zahnprothesen herrühren. Daher ist es wichtig, regelmäßig den Zahnarzt aufzusuchen. Trocken und bei Zimmertemperatur lagern.

Inhaltsstoffe: Cellulose Gum, Petrolatum, Paraffinum Liquidum, Calcium/Sodium PVM/MA Copolymer, Silica, Menthol, Menthyl Lactate, Lecithin.