


1.1

Bild 1.1 Reinigen und trocknen Sie Ihre Zahnprothese.

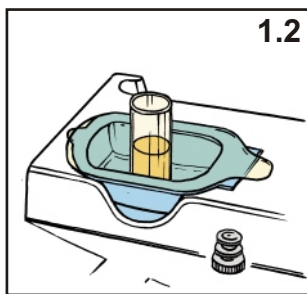

1.2

Bild 1.2 Öffnen Sie das Fläschchen mit der Aufschrift „Separator“ und stellen es aufrecht in die transparente Plastikeinlage.


Hinweis: Der Separator wird verwendet, damit sich die SWC-Mischung nach 4 Wochen leicht von Ihrer Zahnprothese entfernen lässt.



Obere Prothese: 2.1
Innenrand und hinteren Rand nicht mitbestreichen. Ungefähr 5 mm freilassen.

Die Flüssigkeit des Separators verteilen Sie bitte dünn und gleichmässig (Pinsel) über die Innenseite Ihrer Zahnprothese.

Bild 2.1 Obere Prothese: Innenrand und hinteren Rand nicht bestreichen. Ungefähr 5 mm freilassen.

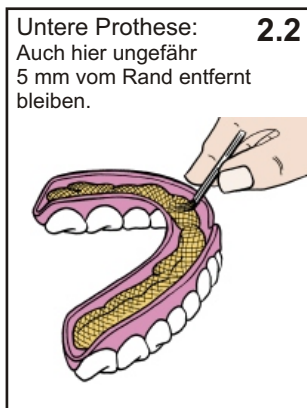

Untere Prothese: 2.2
Auch hier ungefähr 5 mm vom Rand entfernt bleiben.

Bild 2.2 Untere Prothese: auch hier ungefähr 5 mm vom Rand entfernt bleiben.



Untere Prothese mit flacher oder ohne Rille. 2.2a

Den Separator nicht auftragen!

Bild 2.2a Achtung: Den Separator nicht auftragen bei der unteren Prothese mit flachem oder ohne Rand.




Untere Prothese mit tiefer Rille. 2.2b

Separator auftragen!

Bild 2.2b Separator auftragen, 5 mm Rand beachten.


Bitte unbedingt beachten: Der Separator darf nur sehr dünn aufgetragen werden (je weniger um so besser). Verwenden Sie daher nur eine geringe Menge vom Flascheninhalt. Wichtig ist außerdem, dass der Separator komplett abtrocknet. Lassen Sie daher nach dem Bestreichen der Prothese diese 10 Minuten ruhen.

Wenn Sie SWC nach 4 Wochen neu auftragen, prüfen Sie zunächst, ob noch genügend alter Separator auf Ihrer Zahnprothese sichtbar ist. Sie sehen das an der glänzenden, transparenten Oberfläche. Tragen Sie dann keine neue Schicht Separator auf.

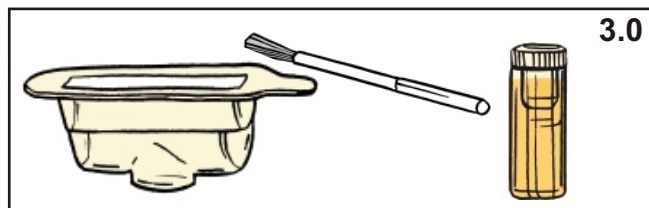

3.0

Bild 3.0 Legen Sie das transparente Plastikschälchen, den Pinsel und das Separatorfläschchen beiseite. Diese Teile werden nicht mehr benötigt.

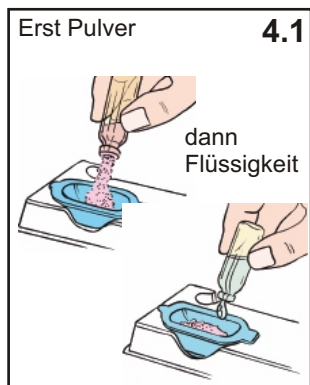


Erst Pulver 4.1

dann Flüssigkeit

Bild 4.1 **Erst Pulver, dann Flüssigkeit**
Füllen Sie die gesamte Menge Pulver in die blaue Mischschale und vermischen diese dann mit der gesamten Menge Flüssigkeit (Mischstäbchen benutzen). Es entsteht eine fließfähige Masse; warten Sie bis die Masse etwas dickflüssiger geworden ist.

Wichtig: Keine Teilmenge anrühren, da sonst keine fließfähige Masse entsteht. SWC ist dann nicht mehr zu gebrauchen.

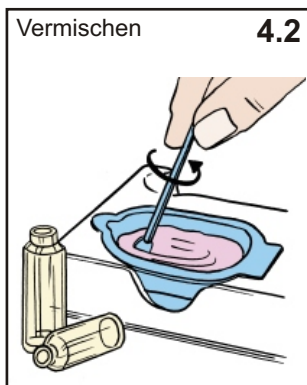

Vermischen 4.2

Bild 4.2 Zum besseren Halt beim Vermischen lassen Sie das blaue Schälchen in der weißen Plastikverpackung. Erst zum Ausgießen entnehmen.

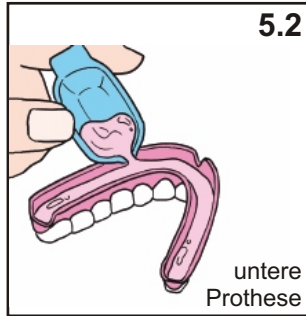
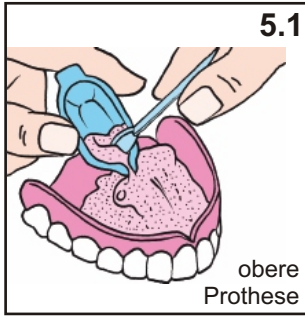


Bild 5.1 und 5.2 (Obere und untere Prothese)
Gießen Sie jetzt die leicht dickflüssige SWC-Masse in die
Höhlung der Prothese.




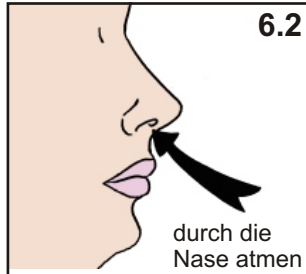


Bild 6.1 Setzen Sie jetzt die Prothese ein. Neigen Sie den Kopf
leicht nach vorn, so vermeiden Sie, dass SWC nach hinten
in den Rachen fließt.

Bild 6.2 Pressen Sie jetzt für ungefähr 4 Minuten die Zähne
zusammen (leicht und ohne Anstrengung). Durch die Nase
atmen. Bewegen Sie während dieser Zeit die Wangen-
muskeln und die Lippen leicht bei geschlossenem Mund.

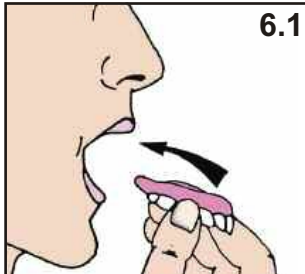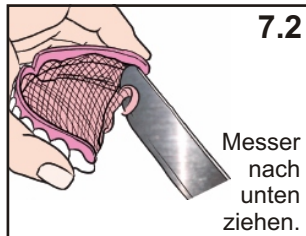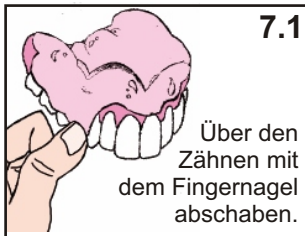

Nehmen Sie die Prothese aus dem Mund und lassen diese 10 Minuten
ruhen, spülen Sie die Prothese dann kurz unter fließendem Wasser.

Bild 7.1 Entfernen Sie die überstehende Masse über den Zähnen
mit dem Fingernagel (abschaben).

Bild 7.2 Den hinteren Rand schneiden Sie bitte mit dem Messer ab.

Achtung

- Nur für komplette Kunststoff-Zahnprothesen - nicht für Metallprothesen.
- 1 Packung SWC ist nur für 1 Prothese bestimmt. Bei Problemen mit der oberen und unteren Prothese benötigen Sie also je Prothese 1 Packung SWC.
- Bitte entfernen Sie SWC unbedingt nach 4 Wochen (benutzen Sie dazu ein stumpfes Messer). Tragen Sie dann neues SWC auf. Bleibt SWC länger als 4 Wochen auf Ihrer Prothese, lässt es sich nur schwer entfernen.

Bitte nach der Anwendung beachten

- Nach Aufbringen des SWC mindestens eine Stunde keine Speisen zu sich nehmen (Trinken ist erlaubt).
- Reinigen Sie Ihre Prothese mit Hilfe einer weichen Zahnprothesenbürste, damit Sie SWC nicht beschädigen.
- Konsultieren Sie Ihren Zahnarzt, wenn SWC keine Verbesserung bringt.
- Verwenden Sie die Intensiv-Reinigungstabletten von BonyPlus. Sie wurden speziell entwickelt, um die Weichheit und Konsistenz des SWC zu erhalten.

Zu beachten

- Kühl (< 25°C) und trocken lagern.
- Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nicht anwenden bei bekannter Allergie auf Inhaltsstoffe.
- Bringen Sie SWC nicht in Kontakt mit wunder Haut.
- Seltene allergische Reaktionen auf Inhaltsstoffe sind möglich.

Inhalt:

1 Fläschchen BonyPlus 45 Flüssigkeit 2,5 ml (Triacetin, Acetyl Tributyl Citrate, Alcohol), 1 Fläschchen BonyPlus 45 Separator Flüssigkeit 0,5 ml (Shellac, Alcohol, Acetone), 1 Fläschchen BonyPlus 45 Pulver 2,95 g (Polyethylacrylate, CI 20055, CI 20060, Titanium Dioxide), 1 Mischstäbchen, 1 Mischschale, 1 Pinsel, 1 Gebrauchsanweisung.

Die Flüssigkeiten sind leicht entflammbar (Flammpunkt 12°C - 14,5°C),